

REVYLINЕ NASAL 300

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование продукта:

Система для промывания носа Revyline

Модель: Nasal 300

Объем резервуара: 300 мл

Комплектация и свойства

Запатентованная система для промывания носа Revyline Nasal 300 изготовлена из высококачественных материалов медицинского назначения. Устройство состоит из эластичного резервуара для воды, 2-х насадок для промывания носа (1 взрослой и 1 детской), кнопки клапана и соединительных трубок. Прибор прост в использовании и компактен. Оптимален для ежедневного ухода за полостью носа.

Область применения

Устройство используется для промывания полости носа при профилактике воспалительных заболеваний, а также для ежедневной профилактики у людей, работающих в условиях высокой запыленности.

Способ применения

1. В резервуар насыпьте 1 упаковку (2.7 г) морской соли и добавьте теплой воды до отметки 300 мл. Используйте воду температурой около 37°C. Она должна быть теплой на ощупь. Тщательно перемешайте жидкость до полного растворения морской соли и закройте крышку.

2. Выберите необходимую насадку. Для промывания носа у ребенка используйте детскую насадку. Детям не подходит насадка для взрослых.

3. Примите правильное положение. Наклоните верхнюю часть туловища вперед, посмотрите вниз, немного наклоните голову в сторону. Удерживая прибор верх дном, аккуратно введите кончик насадки в одну ноздрю. Расслабьтесь, приоткройте рот и дышите через рот. Не задерживайте дыхание. Не дышите через нос. Нажмите кнопку клапана, расположенную на дне резервуара с водой (см. рис.), раствор потечет автоматически. Не сжимайте резервуар с водой. Раствор морской соли подается через одну ноздрю, очищает полость носа и гайморовую пазуху и вытекает из другой ноздри. Чтобы завершить процедуру, отпустите кнопку клапана. При этом раствор перестанет поступать в полость носа. Далее промойте вторую ноздрю.

Меры предосторожности

1. Для промывания носа используйте только специальную морскую соль.
2. Во избежание возникновения дискомфорта, изготавливайте раствор строго установленной концентрации в соответствии с инструкцией компании-производителя.
3. Не используйте прибор при среднем отите, заболеваниях уха, а также если одна ноздря забита и не дышит.
4. Детям процедура проводится под контролем родителей или лечащего врача.
5. Тщательно очищайте прибор до и после процедуры.
6. Система для промывания носа предназначена для использования только одним человеком.

Хранение

Хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. Избегать попадания прямых солнечных лучей и контакта с коррозирующими жидкостями и газом.

Срок годности

2 года с момента даты изготовления.



Не является лекарственным средством.

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.

Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology (Shanghai) Co. Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China (Mainland)

8(800)700-53-60

www.revyline.ru